

El dispositivo Bathmate® Hydromax® Hydropump es un dispositivo externo de rigidez peneana que utiliza la tecnología de vacío para ampliar, mantener y mejorar la calidad y la duración de la erección durante el ejercicio regular del pene. Lea este manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo.

Precauciones

Se recomiendan las siguientes medidas de precaución al usar el dispositivo. Como el producto puede provocar excitación sexual con un aumento del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio, se debe consultar al médico antes de utilizar el producto en caso de padecer cualquiera de los trastornos siguientes: enfermedad cardíaca o pulmonar, hipertensión arterial, apoplejía, epilepsia o trastornos con convulsiones, trastorno genital-urinario (por ej., problemas de riñón, vejiga, testículos o pene), diabetes no controlada, uso de anticoagulantes, anemia falciforme, trastornos hemorrágicos o leucemia.

- Este producto debe ser utilizado por un único usuario.
- Consulte a su médico antes de usar la Hydropump si nota una reducción de la sensibilidad en la zona genital.
- Debe poder controlar el producto en todo momento. Evite quedarse dormido mientras esté usando la Hydropump y evite usarlo bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Debe poder utilizar las manos completamente para usar la Hydropump de forma segura, y debe contar con la fuerza necesaria para hacer funcionar el mecanismo de control de vacío.

Régimen de ejercicios recomendado

Para poder sacar el máximo provecho de la Hydropump y evitar un uso inapropiado que pueda provocarle molestias, se le recomienda encarecidamente el siguiente régimen de ejercicios:

- Asegúrese de que su área púbica tenga el vello bien recortado para facilitar el sellado del vacío contra la pelvis.
- Se requiere un periodo de relajación de unos minutos tomando una ducha o un baño con agua tibia para que los testículos se ablanden, de forma que queden separados del área de sellado y, de esta manera, evitar molestias.
- Evite el bombeo enérgico, ya que esto no da los mejores resultados y puede provocar molestias, manchas o hematomas.
- Para conseguir la máxima rigidez eréctil y un flujo sanguíneo óptimo, lo mejor es retirar el dispositivo cada pocos minutos y dejar que el pene se retraiga. Masajee el pene en estado flácido y, a continuación, vuelva a aplicar el dispositivo y repita el proceso. Debe hacer esto 3 veces como máximo en una sesión de 15 minutos.
- No use la Hydropump durante más de 15 minutos en 24 horas.
- Si desea obtener más información o recomendaciones para aprovechar al máximo su Hydropump, incluidos videos con instrucciones, visite nuestro sitio web: www.dxpsupport.com

Control de Hydropump

La válvula Hydropump se controla con la apertura/el cierre del botón negro y pulsando la válvula hacia el interior, contra el resorte, para liberar el vacío. El botón negro se mueve pulsando hacia dentro y moviéndose hacia la derecha o la izquierda, donde debe hacer "clic" para indicar que está en posición al cerrar la válvula; esta posición solo debe usarse al llenar la Hydropump con agua; si se usa de la forma normal, el botón negro debe encontrarse en la posición central (abierta).

Mientras la Hydropump se está usando, la válvula se abrirá para permitir el paso de agua desde el cuerpo de la bomba con el movimiento descendente y se cerrará automáticamente con el movimiento ascendente, creando así el vacío necesario. El vacío se puede liberar parcial o completamente en cualquier momento presionando el tapón de la válvula hacia abajo.

Uso de la Hydropump en la ducha

- Relájese en la ducha durante unos minutos.
- Asegúrese de que la inserción de confort se encuentra en la posición del interior de los fuelles de la bomba. El cuerpo de la Hydropump puede girarse para poder ver el calibre medidor por encima o por debajo del pene mientras se está usando.
- Presione el botón negro para llevarlo a la posición cerrada con el dedo.
- Mantenga la Hydropump debajo de la ducha hasta que se llene de agua.
- Coloque la Hydropump encima del pene flácido, ajustándolo a la pelvis, con el botón negro en posición cerrada.
- Asegúrese de que la posición resulte cómoda y de que los testículos queden libres.
- Con la Hydropump orientada hacia arriba, abra la válvula presionando el botón negro para llevarlo a la posición central y empieza a bombear.
- Bombee lenta y uniformemente hasta que los fuelles queden presionados, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
- **Asegúrese de seguir el régimen de ejercicios recomendado.**
- Si tiene la correa de ducha opcional, puede hacer deslizar el conector hasta la Hydropump, para tener las manos libres para lavarse.
- Para extraer la Hydropump, presione el tapón de la válvula hacia dentro, para liberar el vacío, y deslice la Hydropump para retirarla del pene.

Uso de la Hydropump en la bañera

- Relájese en la bañera durante unos minutos.
- Llene la Hydropump de agua de baño y siga las mismas instrucciones que para la ducha.
- **Asegúrese de seguir el régimen de ejercicios recomendado.**
- Para extraer la Hydropump, presione el tapón de la válvula hacia dentro, para liberar el vacío, y deslice la Hydropump para retirarla del pene.

Limpieza y mantenimiento

Lave la Hydropump con agua tibia y jabón y enjuáguela bien. Deje que la Hydropump se seque y guárdela en un lugar seco y apartado de la luz solar directa. Si ha comprado el kit de limpieza, siga las instrucciones que se incluyen.

Garantía

La Bathmate Hydromax Hydropump se ha diseñado para que se pueda usar durante muchos años sin problemas. Cuenta con una garantía de dos años que cubre las piezas defectuosas y la fabricación deficiente. Puede consultar toda la información sobre la garantía en nuestro sitio web: www.dxpsupport.com

En el caso poco probable de que deba presentar una reclamación de la garantía, **DX Products Ltd** se reserva el derecho a solicitar la devolución de la Hydropump o a solicitar la presentación de justificantes de los daños, etc.